


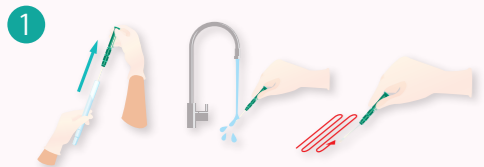

## วิธีการใช้เครื่อง Luc iPac A3

※ นำ Luc iPac มาเก็บในอุณหภูมิห้อง(20~25°C) อย่างน้อย 20 นาทีก่อนนำไปใช้งาน

-  นำก้านสำลีไปชุบน้ำ<sup>※1</sup> แล้วจึงสอดที่จุดตรวจ<sup>※2</sup>.
-  เสียบก้านสำลีลงในปากของ Luc iPac แล้วกดลงไปให้สุด เขย่าจนน้ำยาในปากผสมกับผงเอนไซม์ละลายจนหมด
-  เสียบ Luc iPac ลงไปในช่องตรวจของเครื่อง Lumitester เพื่อวัดค่า

※1 อย่าใช้น้ำเกลือ ※2 ผลการตรวจอาจคลาดเคลื่อนหากมีสารน้ำเชื่อมแอลกอฮอล์ หรือสารทำความสะอาดอยู่บนพื้นผิว

## วิธีการใช้เครื่อง Luc iSwab ES

※ นำ Luc iPac มาเก็บในอุณหภูมิห้อง(20~25°C) อย่างน้อย 20 นาทีก่อนนำไปใช้งาน

-  สวมถุงมือ (แบบที่ไม่มีแป้ง) แล้วนำ Luc iSwab ES ออกจากถุง
-  นำหัวของ Luc iSwab ES จุ่มน้ำสะอาด ※ อย่าใช้น้ำเกลือ
-  สอด Luc iSwab ES เข้าไปในช่องของกล้องส่องทางเดินอาหารผ่าน Biopsy Port จนส่วนหัวผ่านทะลุท่อออกไป
-  นำก้านสำลีของ Luc iPac A3 Surface ออกจาก
-  เสียบปลายของ Luc iSwab ES ลงในปากของ Luc iPac A3 ให้ปลายของ Luc iSwab ES อยู่ในช่องของน้ำยา Releasing Reagent แล้วเขย่าเบาๆ เพื่อให้สิ่งที่ติดมากับหัวของ Luc iSwab ES ละลายลงในน้ำยาให้มากที่สุด ระวังอย่าให้ซิลิโคนนิยมน้ำมันขุ่นขาวทะลุลงไป นำ Luc iSwab ES ออกจากปากของ Luc iPac แล้วทิ้ง Luc iSwab ES ไป
-  นำก้านสำลีของ Luc iPac เสียบเข้าไปในปากแล้วกดจุดสุด เขย่าจนน้ำยาในปากผสมกับผงเอนไซม์ละลายจนหมด
-  เสียบ Luc iPac ลงไปในช่องตรวจของเครื่อง Lumitester เพื่อวัดค่า ※ นำ Luc iPac ออกจากเครื่อง Lumitester ทุกครั้งที่วัดค่าเสร็จ

### Lumitester™ Smart รหัสสินค้า: 61234

เวลาในการตรวจ	10 วินาที
หน่วยการวัด	RLU (Relative Light Unit)
แบตเตอรี่	Alkaline ขนาด AA 2 ก้อน หรือ แบตเตอรี่ Ni-MH rechargeable ขนาด AA 2 ก้อน
อุปกรณ์เสริมที่มีให้	แบตเตอรี่ Alkaline ขนาด AA 2 ก้อน, แปรงทำความสะอาด, สาย USB, สายคล้องเครื่อง, คู่มือการใช้งาน

※ นำ Luc iPac ออกจากเครื่อง Lumitester ทุกครั้งที่วัดค่าเสร็จ เพื่อป้องกันมิให้ของเหลวใน Luc iPac รั่วไหลในช่องตรวจและทำให้เครื่องเกิดความเสียหาย

※ ไม่ควรใช้เครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากการตรวจสอบความสะอาด  
 ※ อุปกรณ์นี้มิได้ออกแบบมาเพื่อตรวจนับจำนวนแบคทีเรียที่มีชีวิต หรือตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคใด

**Luc iSwab ES 2.0-2.2** (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องส่องทางเดินอาหาร 2.0~2.2mm) รหัสสินค้า: 60355 40 แท่ง/ชุด

**Luc iSwab ES 2.8-3.2** (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องส่องทางเดินอาหาร 2.8~3.2mm) รหัสสินค้า: 60356 40 แท่ง/ชุด

**Luc iSwab ES 3.7-4.2** (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องส่องทางเดินอาหาร 3.7~4.2mm) รหัสสินค้า: 60357 40 แท่ง/ชุด

การเก็บรักษา อุณหภูมิห้อง (ห่างจากแหล่งความร้อนและความชื้น)

※ ใช้ Luc iSwab ES ร่วมกับ Luc iPac เท่านั้น อย่าใช้ร่วมกับสินค้าอื่นเพื่อการตรวจที่ถูกต้อง  
 ※ เลือกใช้ Luc iSwab ES ให้เหมาะสมกับขนาดของช่องส่องทางเดินอาหาร  
 ※ อย่าใช้ Luc iSwab ขนาดใหญ่กว่า ช่องส่องทางเดินอาหาร เพราะส่วนหัวของ Luc iSwab อาจจะถูกและติดอยู่ในช่องตรวจ

**Luc iPac™ A3 Surface** รหัสสินค้า: 60361 100 สวท/ชุด

**Luc iPac™ A3 Water** รหัสสินค้า: 60365 100 สวท/ชุด

การเก็บรักษา	2-8°C (อย่าแช่แข็ง)
อายุการเก็บรักษา	15 เดือนหลังจากวันผลิต

※ หากเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงอายุการเก็บจะสั้นลงเหลือเพียง 14 วัน ที่ 25°C และ 5 days ที่ 30°C  
 ※ ใช้ Luc iPac A3 กับเครื่อง Lumitester Smart, PD-30 or PD-20 ไม่สามารถใช้กับเครื่องรุ่นอื่นได้



Lumitester™ Smart




Luc iPac™ A3 Surface

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาด  
 ดูแลสุขภาพในทุพื้นที่ทำงาน

Lumitester™  
**Smart**  
 ATP+ADP+AMP

Hygiene Monitoring System (A3 test)

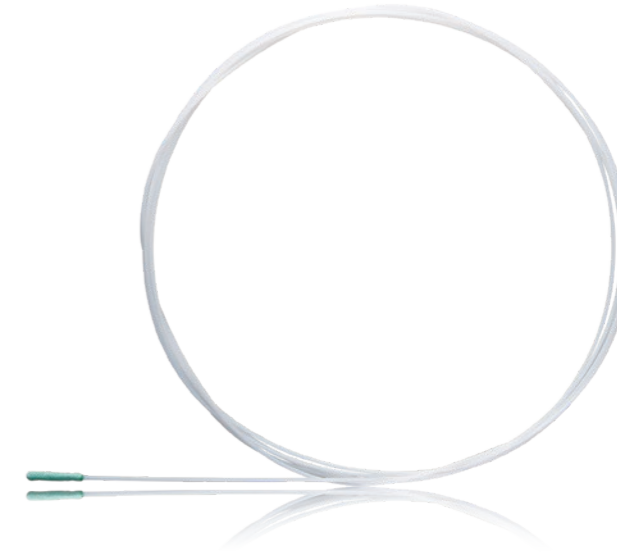

Luc iSwab ES

## Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 JAPAN  
 TEL : +81-3-5521-5481 FAX : +81-3-5521-5498  
 Email: info@kikkomanbio.com

